




3shape

Instrucciones para importar
las librerías gmi
en el software 3shape 

Descargar el software

Desde el ordenador, conectarse a **www.gmidental.com**

En el menú **PRODUCTOS**, ir al apartado Librerías **CAD/CAM > INTERFASE o DIRECTO A IMPLANTE** y seleccionar **3Shape**.


Clicar encima de **3shape** 

Se descargará un archivo (*con el número actualizado de la revisión*) en la carpeta *Descargas* de su ordenador.

Importar librería


La librería se importa utilizando el *Panel de Control* de 3shape.

Ejecútelo y elija "Importar / Exportar".

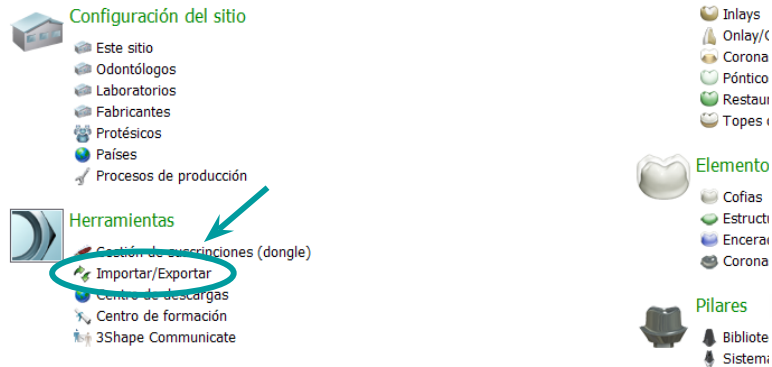

Importar librería

Elija "Importar materiales".

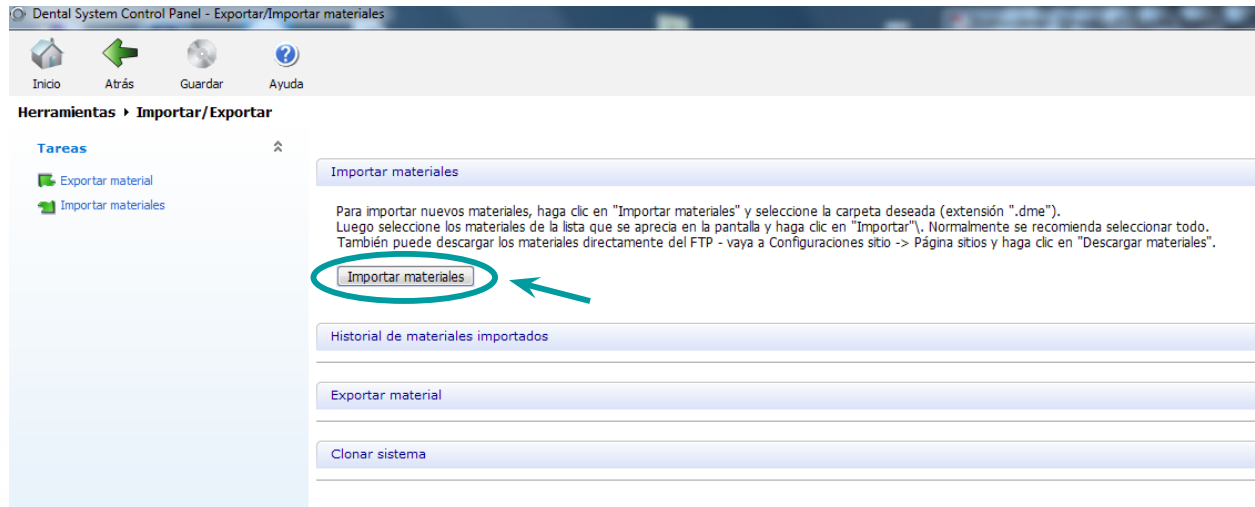

Dental System Control Panel - Exportar/Importar materiales

Inicio Atrás Guardar Ayuda

Herramientas ▶ Importar/Exportar

Tareas

- Exportar material
- Importar materiales

Importar materiales

Para importar nuevos materiales, haga clic en "Importar materiales" y seleccione la carpeta deseada (extensión ".dme"). Luego seleccione los materiales de la lista que se aprecia en la pantalla y haga clic en "Importar". Normalmente se recomienda seleccionar todo. También puede descargar los materiales directamente del FTP - vaya a Configuraciones sitio -> Página sitios y haga clic en "Descargar materiales".

Importar materiales

Historial de materiales importados


Exportar material

Clonar sistema

Importar librería

Le saldrá una ventana para elegir el archivo. Elija la librería que ha descargado de la web y que se encontrará en la carpeta *Descargas*.

Seleccione "Abrir".

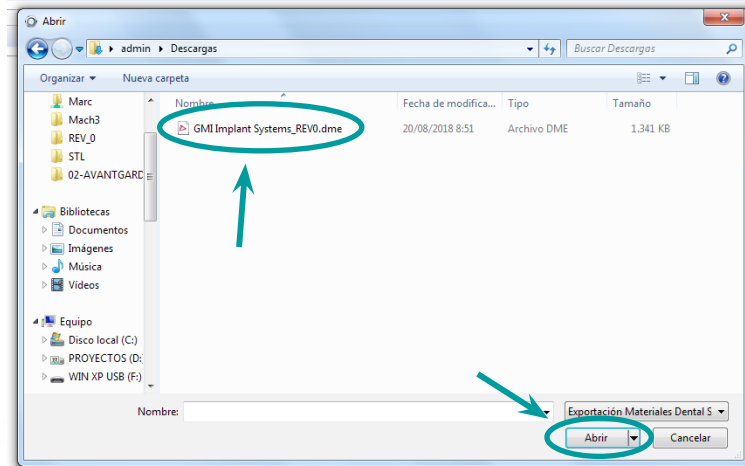

Importar librería

Seleccionar "Importar".

The screenshot shows the 3shape software interface. At the top, there are navigation icons: Inicio, Atrás, Guardar, and Ayuda. Below these, the 'Herramientas' menu is open, showing 'Importar/Exportar'. Under 'Importar/Exportar', there are two options: 'Exportar material' and 'Importar materiales'. The 'Importar materiales' option is highlighted with a blue button. Below this, there are sections for 'Historial de materiales importados', 'Exportar material', and 'Clonar sistema'. The main content area displays the 'Importar materiales' dialog box. The dialog box has a title bar 'Importar y actualizar los materiales' and a subtitle 'Selección de los materiales por importar'. It contains a tree view on the left with 'Materiales disponibles' expanded to show 'Sistemas de implantes'. On the right, there are input fields for 'Nombre de biblioteca' (GMI Implant Systems), 'Proveedor' (GMI), 'Tipo de biblioteca' (Biblioteca de implantes), 'Versión' (1.0), 'Fecha de creación de la biblioteca' (20/08/2018), and 'Descripción' (GMI Avantgard and Frontier CAD/CAM Library). At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: 'Importar' and 'Cancelar'. A red arrow points to the 'Importar' button, which is circled in red.

Inicio Atrás Guardar Ayuda

Herramientas ▶ Importar/Exportar

Tareas

- Exportar material
- Importar materiales

Importar materiales

Historial de materiales importados

Exportar material

Clonar sistema

Importar materiales

Importar y actualizar los materiales

Selección de los materiales por importar

- Materiales disponibles
 - Sistemas de implantes

Nombre de biblioteca
GMI Implant Systems

Proveedor
GMI

Tipo de biblioteca
Biblioteca de implantes

Versión
1.0


Fecha de creación de la biblioteca
20/08/2018

Descripción
GMI Avantgard and Frontier
CAD/CAM Library

Importar Cancelar


Importar librería

Confirmar que se ha importado correctamente.

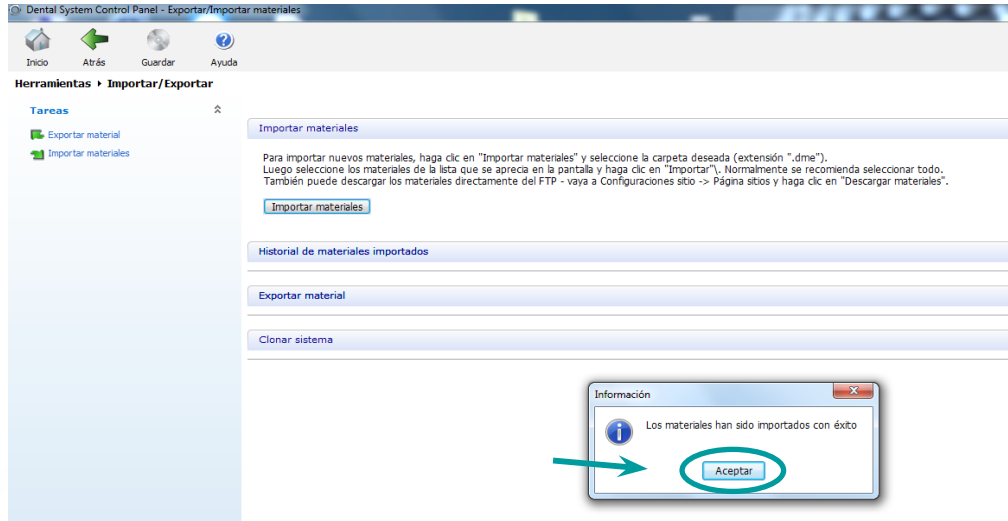

Importar librería

Guardar, confirmar y ya puede utilizar las librerías gmi.

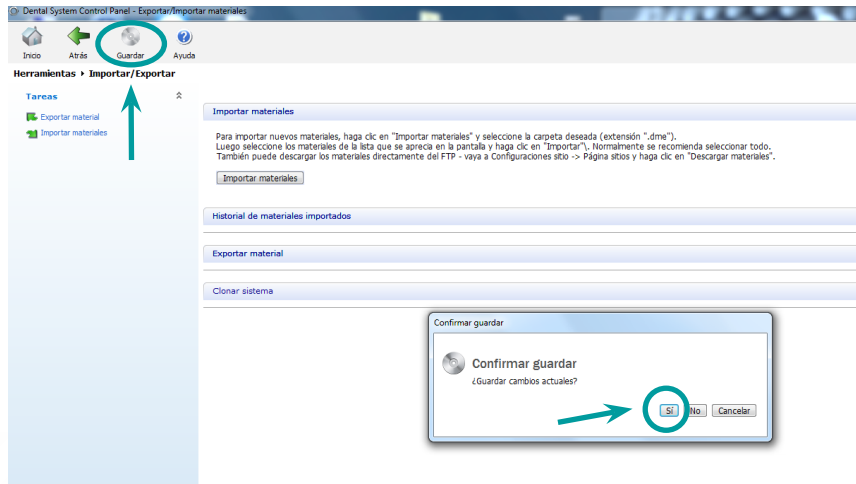

Gracias por su confianza

